



DRAADLOZE CONNECTIVITEIT

resound.com

## ReSound Multi Mic

### Van start...

SNELGIDS VOOR RESOUND


MULTI MIC



## VAN START

(Laad de Multi Mic voor gebruik eerst volledig op)

1. Zet de Multi Mic aan: druk op de powerknop **A** boven op de Multi Mic totdat het indicatielampje **B** groen knippert.
2. **Uw hoortoestellen verbinden met uw Multi Mic:** druk de programmaknop op uw hoortoestellen in totdat u een kort melodietje hoort. Controleer of de verbinding werkt door in de Multi Mic te blazen of er op te kloppen. Dit geluid hoort u als het goed is in de hoortoestellen. Hoort u niets, kijk dan bij 'Problemen oplossen' op de achterkant van deze snelgids.
3. De streaming van de Multi Mic uitschakelen: druk op de programmaknop van uw hoortoestellen. Uw hoortoestellen keren terug naar het laatst gekozen programma: u hoort één of meer piepjes.
4. Uw Multi Mic uitschakelen: druk de powerknop in totdat het indicatielampje eerst rood wordt en dan dempt.

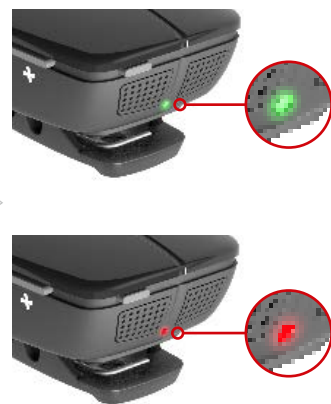

## B INDICATIELAMPJE


- Licht om de 2 seconden groen op als de Multi Mic is ingeschakeld en voldoende is opgeladen.
- Licht elke seconde oranje op als hij nog maar voor minder dan 30 minuten is opgeladen.

## C VOLUMEREGELING

Gebruik de volumeknoppen aan de zijkant van de Multi Mic om het volume aan te passen. Druk op '+' en verhoog het volume, druk op '-' en verlaag het volume. (De mute-indicator **E** knippert elke keer als u het volume aanpast)

## D HOORTOESTELLEN

Druk op de muteknop om de Multi Mic op stil te zetten. De mute-indicator **E** licht nu elke seconde oranje op. Druk nogmaals op de muteknop om het geluid weer aan te zetten. De mute-indicator stopt met knipperen

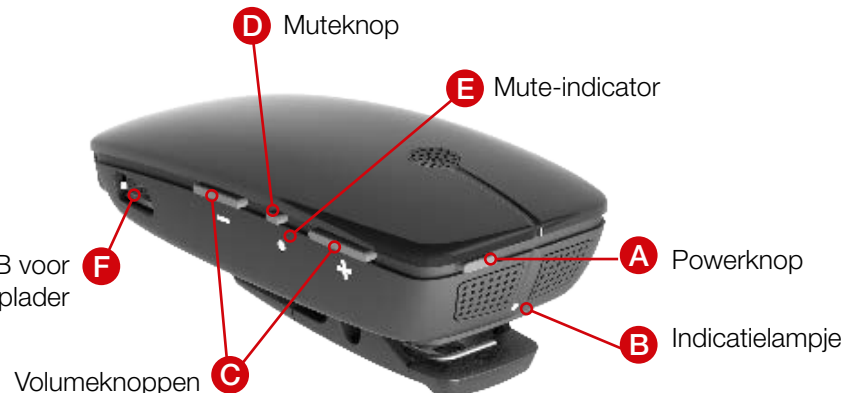

## F OPLADEN

- Steek de oplader in de micro-USB aan de zijkant van uw Multi Mic.
- Indicatielampje knippert als volgt bij opladen:



Status	Tijdens opladen	Volledig opgeladen
Power uit		
Power aan		

## WISSELEN VAN MODUS:

### Werking Modi:

- Microfoonmodus
- Ingebouwde luisterspoel **T**
- Line-in-modus
- FM-modus (audiosysteem)

1. Druk één keer op de modusknop aan de achterkant van de Multi Mic. Het moduslampje naast de huidige modus licht groen op.
  2. Druk binnen 3 seconden de modusknop nogmaals in om de modus te wijzigen.
- Als u een mini-jackkabel of een FM-ontvanger op de Multi Mic aansluit, dan wordt automatisch de juiste modus geselecteerd als het betreffende apparaat is ingeschakeld. Deze modi (Line-in en FM) werken alleen als de Multi Mic met een mini-jackkabel of een FM-ontvanger is verbonden.
  - Zelfs als u verbonden blijft met een FM-ontvanger of Line-in kunt u van modus wisselen. Druk op de modusknop totdat u de gewenste modus heeft bereikt.



## PAIREN VAN UW HOORTOESTELLEN MET DE MULTI MIC

(Uw hoorspecialist doet dit gewoonlijk voor u bij aanschaf)

1. Druk de powerknop op de Multi Mic in tot het indicatielampje groen brandt. De Multi Mic is nu ingeschakeld.
2. Druk met de punt van een pen of iets dergelijks de pairingknop (📶) op de achterkant van de Multi Mic één keer in (zit de pairingknop onder de bevestigingsklem, draai deze dan een kwartslag). Het indicatielampje knippert nu oranje.
3. Uw Microfoon staat nu 20 seconden lang in de pairingmodus. Open en sluit de batterijlades van uw hoortoestellen binnen die tijd.

Een succesvolle pairing herkent u aan een melodie in beide hoortoestellen. Ook brandt het indicatielampje dan 2 seconden lang oranje.




**Let op:** zorg dat uw hoortoestellen in het Multi Mic-streamingprogramma staan als u via de Multi Mic wilt horen.

## PROBLEMEN OPLOSSEN – GEEN VERBINDING

1. **Indicatielampje:** dit lampje moet elke 2 seconden groen oplichten. Zo niet, druk dan de powerknop net zo lang in tot u een groen lampje ziet. Knippert het lampje rood of is het constant oranje, dan moet u de Multi Mic opladen.
2. **Mute-indicator:** is dit lampje oranje, dan is het geluid van de Multi Mic uitgeschakeld en wordt er geen geluidssignaal naar de hoortoestellen gezonden. Druk op de muteknop om het geluid weer in te schakelen.
3. **De batterijstatus van uw hoortoestellen:** vervang de batterijen in uw hoortoestellen. Als deze niet vol genoeg zijn, dan vangen ze het streamingsignaal soms slecht op, terwijl ze bij normaal hoortoestelgebruik nog wel prima functioneren.
4. **Als er meerdere streamingapparaten zijn gepaird:** als u ook een TV-streamer of meer dan één Multi Mic gebruikt.
  - Houd de programmaknop op uw hoortoestel ingedrukt tot u een melodietje hoort.
  - Herhaal deze stap eventueel (nog één of twee keer lang indrukken). De Multi Mic kan namelijk gepaird zijn in 'kanaal' 1, 2 of 3.
5. **Pair de Multi Mic opnieuw met uw hoortoestellen:** zie linksboven hoe u uw hoortoestellen met uw Multi Mic pairt.

De Multi Mic zendt spraak rechtstreeks naar uw hoortoestellen. Klem hem op de kleding van de spreker, hang hem met het halskoord om de nek, of plaats hem op de tafel.

Met de Multi Mic verstaat u spraak vele malen beter, omdat hij zich dichterbij de mond van de spreker bevindt dan uw hoortoestellen.

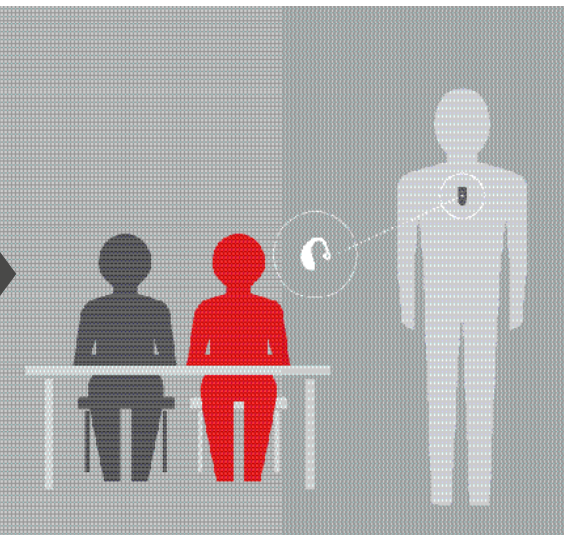

Voor verdere instructies verwijzen wij u naar de volledige handleiding van uw Multi Mic

### GN Hearing Benelux B.V.

ReSound  
Postbus 85  
6930 AB Westervoort  
Nederland  
Tel.: +31 26 319 5000  
info@gnresound.nl  
www.resound.com

### Contactgegevens België

Tel: +32 (0)2 513 55 91  
info@gnresound.be  
www.resound.com

### Internationaal hoofdkantoor

DK-2750 Ballerup, Denemarken  
Tel.: +45 45 75 11 11  
www.resound.com  
CVR no. 55082715